



Elite

Andadores para
interior y exterior

MANUAL DE USUARIO

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo andador **Elite**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 — Partes del andador	4
2 — Descripción del producto	4
3 — Características del producto	5
4 — Precauciones de seguridad	8
5 — Uso y montaje	8
5 — Mantenimiento y limpieza	10
6 — Garantía	11

1. PARTES DEL ANDADOR

*Andador Elite FM



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ANDADOR PLEGABLE DE ALUMINIO MUY LIGERO PARA INTERIORES

El andador **Elite 1G** está diseñado con un sistema de fácil plegado para un cómodo transporte y pensado para ahorrar espacio a la hora de guardarlo en interiores.

ANDADOR CON ASIENTO Y PLEGABLE DE ALUMINIO PARA INTERIORES

El andador con asiento **Elite 3G** es ideal para personas con movilidad reducida, ya que incorpora un cómodo asiento para que el usuario se detenga y descanse a medida que lo necesite.

ANDADOR CON ASIENTO Y FRENO A PRESIÓN O FRENO MANETA

Existen dos versiones del andador **Elite FP** con cuatro ruedas traseras y **Elite FM** con dos ruedas traseras. Ambas versiones tienen dos ruedas delanteras giratorias que hacen más cómodo guiar el movimiento.

ANDADORES PLEGABLES DE ALUMINIO PARA INTERIORES

El andador **Elite 1G UP** está diseñado para personas con dificultad para moverse.

Es un andador plegable de aluminio que cuenta con 2 ruedas delanteras y 2 conteras traseras. Es ideal para su uso en interiores. Su plegado es rápido y sencillo, lo que permite ahorrar espacio y guardarlo en el lugar deseado cuando no se utiliza.

El andador **Elite 3G UP** está diseñado para personas con dificultad para moverse.

Se puede regular la altura y soporta un peso de hasta 136 kg. Cuenta con unos agarres de espuma de calidad que permiten el apoyo firme del usuario a la hora de levantarse, manteniendo el equilibrio y la estabilidad.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



ELITE 1G



ELITE 3G

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	
Ancho total	55 cm
Ancho entre conteras traseras	43 cm
Profundidad total	58,5 - 64,2 cm
Profundidad plegado	17 cm
Alto total (regulable)	78,5 - 97,5 cm
Peso	
Peso total	3,80 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Ruedas	
Medidas ruedas delanteras	Ø14,5 cm
Ancho ruedas delanteras	2 cm
Tipo de ruedas delanteras	Fijas y macizas
Tipo de ruedas traseras	Conteras
Número de ruedas delanteras	2
Material	Aluminio
Color	Negro
Otras características	
Plegable	Sí
Tipo de freno	Conteras

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	
Ancho total	57 cm
Ancho entre conteras traseras	43 cm
Profundidad total	58 - 64 cm
Profundidad plegado	22 cm
Alto total (regulable)	78,5 - 97,5 cm
Peso	
Peso total	4,25 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Material	Aluminio
Color	Negro
Ruedas	
Medidas ruedas delanteras	Ø14,5 cm
Ancho ruedas delanteras	2 cm
Tipo de ruedas delanteras	Fijas y macizas
Tipo de ruedas traseras	Conteras
Número de ruedas delanteras	2
Otras características	
Plegable	Sí
Tipo de freno	Conteras
Medidas cesta	38 x 20 x 19 cm
Medidas embalaje	55 x 57,5 x 14,5 cm



ELITE^{FP}

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	
Ancho total	61 cm
Ancho entre conteras traseras	36 cm
Profundidad total	56,5 - 60,5 cm
Profundidad plegado	22 cm
Alto total (regulable)	82 - 96 cm
Peso	
Peso total	6,70 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Material	Aluminio
Color	Negro / Negro y azul / Negro y verde
Ruedas	
Medidas ruedas delanteras	Ø14,5 cm
Medidas ruedas traseras	Ø14,5 cm
Ancho ruedas delanteras	2 cm
Ancho ruedas traseras	2 cm
Tipo de ruedas	Macizas
Número de ruedas delanteras	2 giratorias
Número de ruedas traseras	4
Color ruedas	Negro/Azul/Verde
Otras características	
Cesta	Cesta de tela
Medidas cesta	38 x 20 x 19 cm
Medidas embalaje	48 x 52 x 18 cm
Peso máximo cesta	5 kg
Plegable	Sí
Tipo de freno	Freno presión
Peso máx. soportado cesta	5 kg



ELITE^{FM}

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	
Ancho total	59 cm
Ancho entre conteras traseras	50 cm
Profundidad total	65 - 69 cm
Profundidad plegado	29 cm
Alto total (regulable)	84 - 98 cm
Peso	
Peso total	6,70 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Material	Aluminio
Color	Negro / Negro y azul / Negro y verde
Ruedas	
Medidas ruedas delanteras	Ø14,5 cm
Medidas ruedas traseras	Ø14,5 cm
Ancho ruedas delanteras	2 cm
Ancho ruedas traseras	2 cm
Tipo de ruedas	Macizas
Número de ruedas delanteras	2 giratorias
Número de ruedas traseras	2
Color ruedas	Negro/Azul/Verde
Otras características	
Cesta	Cesta de tela
Medidas cesta	38 x 20 x 19 cm
Medidas embalaje	48 x 52 x 18 cm
Peso máximo cesta	5 kg
Plegable	Sí
Tipo de freno	Freno maneta
Peso máx. soportado cesta	5 kg



ELITE 1G UP!

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	
Ancho total	57,9 cm
Ancho entre conteras traseras	51 cm
Profundidad total	58,5 cm
Profundidad plegado	33,5 cm
Alto total (regulable)	81 - 95,9 cm
Peso	
Peso total	4,20 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Material	Aluminio
Color	Negro
Ruedas	
Medidas ruedas delanteras	Ø14,5 cm
Ancho ruedas delanteras	2 cm
Tipo de ruedas delanteras	Fijas y macizas
Tipo de ruedas traseras	Conteras
Número de ruedas delanteras	2
Otras características	
Plegable	Sí
Tipo de freno	Freno maneta



ELITE 3G UP!

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	
Ancho total	57,9 cm
Ancho entre conteras traseras	51 cm
Profundidad total	58,5 cm
Profundidad plegado	33,5 cm
Alto total (regulable)	81 - 95,9 cm
Altura del asiento al suelo	45,6 - 50,7 cm
Peso	
Peso total	5,85 kg
Peso máximo soportado	136 kg
Material	Aluminio
Color	Negro
Ruedas	
Medidas ruedas delanteras	Ø14,5 cm
Ancho ruedas delanteras	2 cm
Tipo de ruedas delanteras	Fijas y macizas
Tipo de ruedas traseras	Conteras
Número de ruedas delanteras	2
Otras características	
Plegable	Sí
Tipo de freno	Freno maneta
Tamaño del asiento	37 x 24,5 cm
Tamaño de la bolsa	37,5 x 22 x 16 cm

4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No permita que los niños jueguen con el envase sin supervisión.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños, no es un juguete. Los niños pueden lesionarse.

El andador debe manejarse pegado al cuerpo, adoptando una postura lo más recta posible y mirando al frente.

El andador sólo debe utilizarse para lo que se ha desarrollado.

La carga máxima del andador es de 136 kg.

El andador sólo se puede utilizar si está en perfecto estado.

Asegúrese antes de cada uso de que el andador funciona bien. Todos los tornillos deben estar apretados.

El asiento del andador sólo está pensado para descansos cortos y no es adecuado como silla.

No se ponga nunca de pie sobre el andador y no lo utilice para transportar personas.

Debe comprobarse la temperatura de la superficie del andador antes de utilizarlo. En condiciones climáticas adversas (por ejemplo, frío extremo, luz solar directa, agua caliente o visitas a la sauna), la superficie puede alcanzar temperaturas peligrosas para la salud.

Utilice el andador sólo en superficies planas y lisas. Evite alcantarillas, rejillas u obstáculos similares, ya que las ruedas podrían quedar atrapadas.

El andador sólo debe utilizarse después de haber sido completamente revisado y en la posición desplegada y bloqueada.

4. USO Y MONTAJE

4.1. USO DEL PLEGADO Y EL DESPLEGADO


Solo para: *ELITE 16 ELITE 16UP! ELITE 36UP!*

- 1. Plegado:** Tire hacia arriba de la barra de plegado, para que se pliegue el andador.
- 2. Desplegado:** Tire hacia abajo la barra de plegado, para que se despliegue el andador.

Paso 1




Paso 2

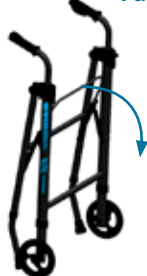

Solo para: *ELITE 36 ELITE FM ELITE FP*

- 1. Plegado:** Pliegue el asiento hacia arriba y tire de él verticalmente. Así se plegará el andador.
- 2. Desplegado:** Despliegue el asiento hacia abajo y tire de él verticalmente. Así se desplegará el andador.

Paso 1

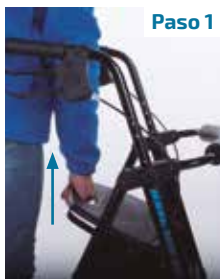

Paso 2



PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no pellizcar las manos a la hora de plegar y desplegar el andador. ¡Riesgo de daños!

4.2. USO DE LA REGULACIÓN DE ALTURA DEL ANDADOR

Utilice el regulador de altura para ajustar las asas de ambos lados a la altura deseada. Las asas deben estar a la altura de la muñeca.

Una vez regulado, es importante que ambas empuñaduras estén siempre al mismo nivel

La altura del mango se puede ajustar a través de los agujeros. Para ajustar la altura, afloje y retire los tornillos de ambos lados y ajuste la barra a la altura deseada. Fije ambos tornillos en el orificio correspondiente.



4.3. REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ASIENTO

Para regular la altura del asiento debe regular los tubos delanteros y traseros, presione la bola de regulación y regule a la altura deseada.

Una vez regulado, es importante que ambas patas delanteras y traseras estén siempre al mismo nivel.



4.4. USO DEL FRENO

*Solo para: **ELITE^{FM}***

Freno de servicio (al empujar): Tire de las palancas de freno hacia arriba.

Freno de estacionamiento (al estacionar y usar la función de asiento): Presione las palancas de freno hacia abajo, el andador quedará bloqueado.



4.3. MONTAJE DEL ANDADOR

Paso 1: Retire el material de embalaje.

Paso 2: Retire el chasis y deposite el andador delante de usted, baje la barra de plegado.

Paso 3: Despliegue la estructura del andador y colóquelo en el suelo.

Paso 2



Paso 3



Paso 4: Monte los tubos de las patas delanteras y traseras en la estructura presionando hacia dentro. Dado que este modelo dispone de doble regulación independiente de la altura del asiento y de la altura de los puños, regule las ruedas y/o las patas en relación con la altura a la que desea el asiento.



Paso 5: Coloque el mango y ajústelo a la altura adecuada, y asegúrelo con las asas.



Solo para: *elite³⁶* *elite^{FM}* *elite^{FP}*

Paso 6: Coloque el respaldo en la estructura presionando sobre ambas bolas de regulación.



Solo para: *elite^{36UP!}* *elite^{LITE}*

Paso 6: Para colocar el respaldo, debe de orientar la flecha para que mire hacia arriba, coloque el respaldo y baje la flecha para fijar el soporte del respaldo.



PRECAUCIÓN

Utilice el andador sólo cuando esté completamente montado y en posición desplegada y bloqueada. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el producto está en perfectas condiciones. No utilice el andador si tiene daños visibles, o si existe la sospecha de que pueda estar dañado.

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Asegúrese de que **todos** los herrajes de sujeción estén seguros en **todo** momento
- Compruebe que los tornillos que fijan el asiento a la ranura lateral esté bien apretado. Si no es así, apriételo. Si es necesario, contacte inmediatamente con el establecimiento dónde compró el andador.
- Sustituya inmediatamente cualquier elemento roto, dañado o desgastado.
- Limpie las ruedas con agua tibia y un limpiador suave. Secar con un trapo limpio.
- Lubrique con aceite periódicamente si las ruedas empiezan a chirriar.

8. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Andadores Elite, interior e exterior

V6 · 04/04/2024