



iROLLER

TECH ASSIST MOBILITY

CALIBRACIÓN DEL MANDO ACOMPAÑANTE

Antes de empezar a usar el andador iRoller, es aconsejable asegurarse de que el giroscopio interno del mando acompañante esté **adecuadamente calibrado**.

Esto garantizará un funcionamiento óptimo y preciso del dispositivo.

VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

Para asegurarse de que está correctamente calibrado, presione el botón  y avance entre los programas hasta llegar al indicado.

El número que debe visualizar debería oscilar entre **-1.0 y 1.0**.



Si el valor mostrado no se encuentra dentro del rango de -1.0 a 1.0, es recomendable recalibrar el mando para un mejor funcionamiento en subidas y bajadas.

CALIBRACIÓN DEL MANDO

Si necesita recalibrar el mando acompañante, por favor consulte y siga los pasos detallados en el video adjunto.



Recomendamos leer el manual de usuario, antes de utilizar el iRoller