


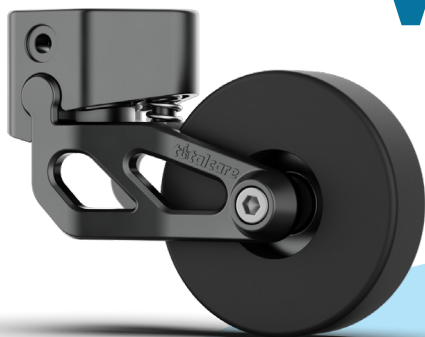

¡Fácil y rápido!
¡Despídase del taladro!
Instale el kit de ruedas,
sin necesidad de agujero.

x2
Kit



walk&roll+
IM by TotalCare® **plus**

Kit de ruedas de frenado

MANUAL DE USUARIO

más de **50 años** viviendo sin límites

ⓘ Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo kit de ruedas dre frenado **Walk&Roll Plus®**.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Descripción.....	4
2 – Instrucciones de montaje.....	5
3 – Garantía.....	6

DESCRIPCIÓN

KIT DE RUEDAS DE FRENADO PARA ANDADORES · WALK&ROLL PLUS®

TotalCare Europe, presenta las innovadoras ruedas para andadores **Walk&Roll Plus®**.



Las ruedas **Walk&Roll Plus®** sirven para transformar el andador de interior a exterior, gracias a su freno a presión. Esto significa que al presionar el caminador, la contera se apoya en el suelo frenando el caminador, proporcionando un mayor control y seguridad.

La característica principal de estas ruedas es que dispone de un freno de presión regulable, lo que le permite al usuario ajustar la presión del freno a su gusto y necesidad. Esta característica diferencia a las ruedas **Walk&Roll®** de otros productos similares.

Además, se pueden adaptar a muchos andadores, al ser compatibles con tubos de 22, 25 y 30 mm, vienen 2 ruedas por caja y la tornillería y herramientas están incluidas.

Las nuevas **Walk&Roll Plus®** permiten la instalación del kit en su andador sin necesidad de perforar los tubos de las patas. Gracias a los dos tornillos de fijación y al sistema de sujeción desarrollado por TotalCare Europe, ya no es necesario el uso de un taladro para instalarlas.

- ✓ **2 ruedas⁽¹⁾**
- ✓ **2 tornillos de fijación⁽²⁾** (20 mm de largo)
- ✓ **1 destornillador plano⁽³⁾** (para la regulación de presión)
- ✓ **1 llave allen de 4 mm⁽⁴⁾** (para la fijación de las ruedas)
- ✓ **2 casquillos gruesos⁽⁵⁾** (para tubo de 22 mm)
- ✓ **2 casquillos finos⁽⁶⁾** (para tubo de 25 mm)
- ✓ **Sin casquillos** (para tubo de 30 mm)
- ✓ **Manual de usuario**

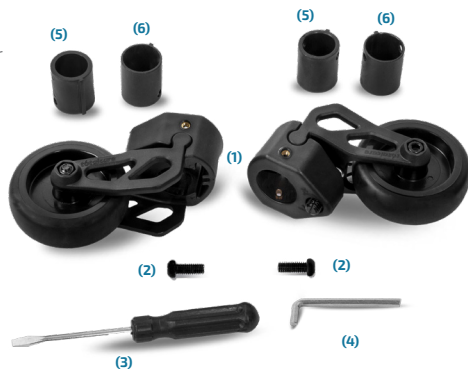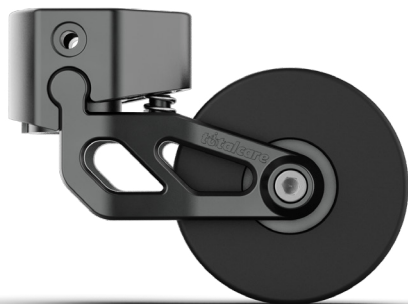

Video de montaje

Escanee el código QR para visualizar el video de montaje

¡Se lo ponemos fácil, visualice el video y coloque las ruedas en un instante!



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Fijación de la rueda

1. Extraiga la contera de su andador.
2. Coloque la rueda **Walk&Roll Plus®** en el tubo del andador.
3. Coloque el casquillo adecuado de 22 mm o 25 mm. En caso de que el tubo del andador sea de 30 mm, no será necesario añadir el casquillo.
4. Utilice los dos tornillos cortos de sujeción provistos y apriételos firmemente con la llave Allen de 4 mm incluida en la caja para asegurar que la rueda ha quedado bien fijada.



Con el kit de ruedas **Walk&Roll Plus®**, **no es necesario realizar un orificio con el taladro para instalarlas**



Asegúrese de fijar y apretar correctamente los dos tornillos para garantizar que la rueda esté firmemente sujeta a la pata de su andador.



Regulación de la altura y fuerza de presión

Menos presión

Para reducir la resistencia y suavizar el freno, debe girar el tornillo hacia la izquierda siguiendo el símbolo "-". A medida que se reduce la presión, las conteras del andador se elevan.

Más presión

Para aumentar la resistencia y fortalecer el freno, debe girar el tornillo hacia la derecha siguiendo el símbolo "+". A medida que se aumenta la presión, las conteras del andador se vuelven menos elevadas.

Es **importante** ajustar la presión de acuerdo a las necesidades y preferencias del usuario para garantizar una mayor comodidad y seguridad en su uso.



Se recomienda dejar una elevación de las conteras hasta al suelo de 15 mm.

Es importante revisar que la regulación de ambas ruedas del andador queden a la misma altura para un correcto funcionamiento.

Herramienta necesaria: destornillador plano (incluido en el packaging).

GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto está defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirió el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicada autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.



Legenda etiquetaje.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Representante Europeo.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Lote.



Datos del fabricante.



Referencia del producto.



Fecha de fabricación.



Número de serie.

Manual de usuario

Walk&Roll Plus®

V1 · 10/01/2024