



9140

Ayudas de baño

MANUAL DE USUARIO

Ref. BSDPAL9140FB

más de **50 años** viviendo sin límites



Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM by TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva **silla de ducha 9140**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 — Partes	4
2 — Descripción	4
3 — Características técnicas	5
4 — Instalación y uso	6
5 — Mantenimiento y limpieza.....	6
6 — Garantía.....	7

1. PARTES DE LA SILLA 9140



2. DESCRIPCIÓN DE LA SILLA 9140

SILLA DE DUCHA CON ASIENTO HERRADURA

La banqueta de ducha con respaldo 9140 está pensada para facilitar la higiene personal de aquellas personas con problemas de movilidad reducida, pero que conservan cierta capacidad de movimiento y un cierto grado de estabilidad

a la hora de permanecer sentados. Destaca por su estructura de aluminio que evita los efectos de la corrosión que podría provocar su continuo contacto con el agua.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA SILLA 9140

9140



Medidas

Ancho total	50,5 cm
Profundidad total	60 cm
Alto total (regulable en altura · 6 niveles)	70 - 80 cm
Alto del asiento al suelo	35 - 45 cm
Ancho del asiento	41 cm
Profundidad del asiento	37,5 cm
Ancho del respaldo	39 cm
Alto del respaldo	22,5 cm



Peso

Peso total	2,70 kg
Peso máximo soportado	100 kg

MaterialPlástico y aluminio

ColorBlanco

4. INSTALACIÓN Y USO DE LA SILLA 9140

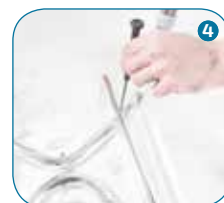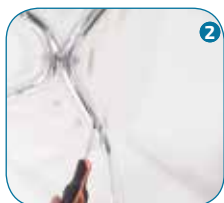

- Colocar los tubos de metal siguiendo el dibujo de la base, colocar el palo con más curvatura primero y después el de menos. **1**
- Atornillar el cruce de ambas patas, coloque los objetos redondos grises y después introduce el tornillo, no se olvide la tuerca en la punta del tornillo. **2**
- Atornillar los 6 agujeros con sus tornillos y sus arandelas. **3**
- Coloca los hierro con forma de L encima de las cruces de las patas, coloca los tornillos más largos con sus arandelas en los cuatro agujeros visibles. **4**
- Los cuatro agujeros superiores de los palos de hierro que tienen forma de L, coloca cuatro tornillos de cruz más con su arandela, importante no ajustar los tornillos hasta tener colocado los cuatro tornillos de cruz. **5**

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA SILLA 9140

- Por favor, compruebe si todas las piezas están bien ajustadas antes de usarlas.
- Sugerimos estar acompañado de un asistente.
- No lo use en una rampa. Tenga cuidado cuando lo use en un lugar resbaladizo.
- Mantenga la misma altura de los 4 tubos cuando se ajuste.
- Se debe escuchar un "clic" cuando se instala el respaldo.
- Las ventosas de las patas son de plástico. Por favor, cambiar cuando estén gastadas.
- Transporte: Este producto necesita ser almacenado en un ambiente seco, estable, no corrosivo y lejos de la lluvia.
- Limpie el producto con un paño suave y seco.
- Desechar el producto según las normativas medioambientales locales

ATENCIÓN: Cuidado cuando lo use si los miembros inferiores del usuario están impedidos.

6. GARANTÍA DE LA SILLA 9140

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por un defecto de fabricación del producto que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 2 años desde la compra del producto, a partir del tercer año, para hacer valer la garantía, el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor también deberá dirigirse preferiblemente al punto de venta donde adquirió el producto. En el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunidad autónoma, podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com. El cual podrá dirigirle al punto de venta más cercano a su domicilio.

Es imprescindible presentar **copia de la factura o del ticket de compra** en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha. Así como el **justificante del pago** para importes de más de 1000€. También deberá ser acompañado con una nota explicativa de la falta de conformidad y una fotografía del número de serie.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario, negligencia, por no obedecer las instrucciones indicadas en este manual, causadas por otros factores humanos, por colisión con algún objeto o por daños causado por un tercero.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas, cualquier evento de la naturaleza o de fuerza mayor.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante.
- Los daños ocasionados por el transporte o por un mal embalaje.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste provocados por el uso, tales como: Ruedas, tapizados, almohadillas de reposabrazos, electrofreno, bombillas, baterías, etc....
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.

Manual de usuario

Silla de ducha 9140

V3 · 15/02/2022