



Saby kit de freno

Silla de ruedas manual
con kit de freno

MANUAL DE USUARIO

Ref. SACSABYKF/SALSABYKF

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM by TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva silla de ruedas **Saby con kit de freno**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

- 1 — Partes de la silla 4
- 2 — Descripción del producto 4
- 3 — Características del producto5
- 4 — Uso 7
- 5 — Aviso y mantenimiento.....9
- 6 — Garantía10

1. PARTES DE LA SILLA



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La silla de ruedas **Saby** está fabricada en acero o aluminio y dispone de un sistema de doble cruceta para facilitar su plegado. Es muy ligera pero a la vez resistente, admitiendo un peso máximo de 120 kg.

El restyling de la **Saby** presenta nuevas prestaciones, como un novedoso diseño del lateral con un agarre para facilitar la incorporación, una mayor inclinación del respaldo para mejorar la comodidad y unas ruedas delanteras más robustas y anchas de 5 cm.

Las ruedas traseras de la silla **Saby** tienen una medida de Ø30 cm, y las ruedas traseras de la silla **Saby** tienen una medida de Ø60 cm, estas últimas permiten al usuario autopropulsarse con la silla.

Disponible en azul mate y gris mate, dicho acabado le proporciona a la silla una apariencia moderna y pulida.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Saby-20 KF



Saby-30 KF

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	Saby-20/30	Saby-21/31
Ancho total (talla 40)	55 cm	58,5 cm
Ancho total (talla 42)	57,5 cm	61 cm
Ancho total (talla 45)	60,5 cm	65 cm
Alto total	90 cm	90,5 cm
Profundidad total (talla 40)	97,5 cm	103,5 cm
Profundidad total (talla 42)	98,5 cm	103,5 cm
Profundidad total (talla 45)	99 cm	104,5 cm
Ancho total plegada	26 cm	29 cm
Alto del asiento al suelo	49 cm	49 cm

Peso	Saby-20	Saby-21	Saby-30	Saby-31
Peso total	15 kg	16,60 kg	12 kg	13,60 kg
Peso sin los reposapiés	13,45 kg	15,05 kg	10,45 kg	12,05 kg
Peso máximo soportado	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg

Material	Acero/Aluminio	Color	Azul mate / Gris mate
----------	----------------	-------	-----------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento (talla)	40 cm / 42 cm / 45 cm
Profundidad del asiento	41 cm
Tipo de asiento	Fijo
Material del asiento	Tela impermeable e ingífuga



Kit de freno

Reposabrazos

Ancho de reposabrazos	5 cm
Largo del reposabrazos	28 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles



Reposabrazos abatible

Reposapiés

Altura del reposapiés	Regulable de 38 a 49 cm
Peso de los 2 reposapiés	1,55 kg
Tipo de reposapiés	Individuales, regulables y extraíbles
Material del reposapiés	Plástico y acero

Respaldo

Ancho del respaldo	40 cm / 42 cm / 45 cm
Alto del respaldo	44 cm
Inclinación del respaldo	6°
Material del respaldo	Tela impermeable e ingífuga



Reposapiés extraíbles

Ruedas	Saby-20/30	Saby-21/31
Medidas ruedas delanteras	Ø 20 cm	Ø 20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 30 cm	Ø 60 cm
Ancho ruedas delanteras	5 cm	5 cm
Ancho ruedas traseras	5 cm	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables	Macizas / Hinchables



Ruedas delanteras de 5 cm de ancho

Otras características

Tipo de freno	Freno bloqueo
Tipo de plegado	Cruceta simple con 4 estabilizadores
Accesorio de serie	Eleva reposabrazos 2 cm

4. USO

4.1 COMO DESPLEGAR SU SILLA

Colocar las manos en la parte delantera y trasera por la mitad del tapizado de asiento, empujar hacia abajo para abrir la silla. Silla desplegada.

Nota: al desplegar la silla, no empujar con fuerza el chasis hacia abajo para no dañar piezas. No sostenga la silla por los tubos del asiento cuando empuje hacia abajo, puede cogerse los dedos.



4.2 COMO PLEGAR SU SILLA

Primero, levantar las plataformas de los reposapiés, y el tapizado del asiento para poder plegar la silla.



4.3 AJUSTE DE LA PLATAFORMA DEL REPOSAPIÉS

Aflojar las tuercas con una llave, mueva hacia abajo el tubo y ajuste la plataforma a la posición correcta, luego bloquear y ajustar los tornillos con una llave en sentido de las agujas del reloj.



4.4 CÓMO LLEVAR LA SILLA UNO MISMO

Una vez sentado el usuario en la silla, coger los aros de las ruedas traseras con ambas manos e impulsar con fuerza hacia adelante para que la silla comience a moverse. Soltar los aros. Cuando la silla vaya parando volver a repetir la acción.



4.5 ¿CÓMO SUPERAR OBSTÁCULOS?

En caso de encontrarse con obstáculos, el acompañante debe coger la silla por los puños, pisar el extremo del tubo hacia atrás para que se eleve la parte de las ruedas delanteras, y así poder pasar el obstáculo.



4. USO

4.6 USO DE LOS FRENOS

Freno de servicio (al empujar): Tire de las palancas de freno hacia arriba.

Freno de estacionamiento (al estacionar y usar la función de asiento): Presione las palancas de freno hacia abajo para bloquear y hacia arriba para desbloquear el freno estacionamiento.



Freno de estacionamiento



Freno de servicio

El usuario sujeta los frenos con las manos, una vez la silla está quieta, los acciona, para que las ruedas traseras queden completamente bloqueadas.





4.7. COMO TENSAR LOS FRENOS

Para ajustar la tensión de los frenos, es necesario utilizar una llave Allen de tamaño 2,5 y un par de alicates. Utilizando los alicates, sujetaremos el cable del freno de color plateado y lo tiraremos hacia arriba para aplicar tensión.



Luego, con la llave Allen, la colocaremos en la posición indicada en la imagen (1). Mientras aplicamos tensión con los alicates, giraremos la llave Allen, siguiendo la dirección de las agujas del reloj.

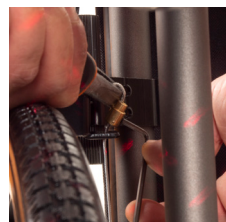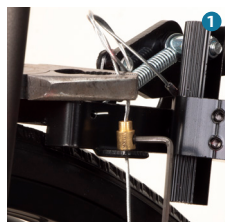

4.8 REPOSABRAZOS ABATIBLES

Para abatir el reposabrazos hacia atrás, presione el seguro para separar el soporte del tubo del asiento, luego mueva el reposabrazos hacia atrás. Para volver a colocar el reposabrazos en su posición original bajar el reposabrazos y encajar el reposabrazos en el soporte del tubo del asiento.



4.9 REPOSAPIÉS DESMONTABLE

Para la instalación del reposapiés, primero póngalo del derecho, encaje el pivote, luego mueva el reposapiés de fuera hacia adentro hasta que encaje y quede bien fijado; para extraer el reposapiés, lo que debería hacer primeramente es mover el sistema gatillo hacia adentro, sáquelo hacia arriba, extraiga el reposapiés.



4.10 ACCESORIO ELEVA REPOSABRAZOS

Disponible de serie un accesorio para elevar 2 cm el reposabrazos. Para colocarlo, primero desatornille el reposabrazos. Una vez extraído, colo-

que las dos piezas negras sobre los tornillos, una encima de la otra, y vuelva a colocar el reposabrazos. Después atornillelo junto con las dos piezas colocadas previamente.



5. AVISO Y MANTENIMIENTO

5.1. AVISO

- Se aconseja utilizar la silla en superficies planas, dentro o fuera de una habitación, en recorridos más largos es preferible que siempre haya un acompañante para poder ayudar al usuario, en caso de encontrarse con obstáculos.
- La silla tiene una capacidad máxima de 120kg.
- Para utilizar la silla de ruedas sin problemas, la velocidad debe ser de 3 a 5km/h.
- Los frenos se utilizan para parar la silla. No utilizar los frenos si está en movimiento, especialmente si se sube o baja una pendiente, hay riesgo de volcar.
- Los usuarios no deben incorporarse sobre los reposapiés podrían volcar la silla y caer.
- Mientras usa la silla de ruedas en una pendiente no incline la silla ni gire repentinamente.
- No frene si va cuesta abajo, podría volcar.

5.2. MANTENIMIENTO

- Examinar la silla periódicamente para comprobar que estén todos los tornillos y que estén ajustados antes de utilizar la silla. En caso que falte alguno o que alguno esté flojo llevarla al servicio técnico.
- Se debe añadir aceite lubricante en las partes móviles de la silla para un mejor funcionamiento.
- Limpiar la silla con un paño suave y seco.
- Mantener el tapizado de asiento y respaldo limpios para proteger la piel del usuario.

6. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

SILLA DE RUEDAS MANUAL**SABY CON KIT DE FRENO**

El asiento y respaldo de esta silla están tapizados con tela ignífuga de color negro y su asiento tiene un ancho de 40, 42 y 45 cm.



Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Silla de ruedas manual Saby con kit de freno

V2 · 26/07/2023