



Saby Plus

Silla de ruedas manual
de acero o aluminio

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

SABY PLUS



Saby-20/30 Plus

Saby-21/31 Plus

SILLA DE RUEDAS DE ACERO O ALUMINIO PLEGABLE, DE EMPUJE ASISTIDO O AUTOPROPULSIÓN

La Saby Plus es la versión superior de la silla Saby, mejorada con prestaciones que superan a la silla líder en ventas. Fabricada en acero (Saby-20/21) o aluminio (Saby-30/31), es ligera y robusta, soportando 120 kg.

Está disponible en dos tamaños de ruedas: Ø30 cm en la Saby-20/30 Plus y Ø60 cm en la Saby-21/31 Plus, todas equipadas con el sistema de extracción rápida quick release.

La Saby Plus destaca por su amplia gama de prestaciones, incluyendo un tapizado cómodo y acolchado con cinchas tensoras, puños con altura regulable, horquillas de aluminio, kit de freno de serie, asiento regulable en profundidad, regulación de la altura del asiento y ajuste del centro de gravedad, que permite desplazar la rueda trasera hacia atrás para una configuración más pasiva, entre muchas otras opciones.

Disponible en azul mate y gris mate, su acabado proporciona a la silla una apariencia moderna y elegante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento (talla)	40 cm / 42 cm / 45 cm
Profundidad del asiento (regulable)	42 - 49 cm
Alto del asiento al suelo (regulable)	45,5 - 50,5 cm

Reposabrazos

Ancho del reposabrazos	5 cm
Largo del reposabrazos	28 cm
Alto del reposabrazos (regulable)	21 - 23 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles y regulables

Reposapiés

Altura del reposapiés	Regulable de 38 a 49 cm
Tipo de reposapiés	Individuales, regulables y extraíbles
Material del reposapiés	Plástico y aluminio
Tipo de plataforma	Regulable en inclinación

Respaldo

Ancho del respaldo	40 cm / 42 cm / 45 cm
Alto del respaldo	46 cm
Material del respaldo	Tela extraíble, impermeable e ignífuga
Tipo de respaldo	Regulable con 5 cinchas tensoras

	Saby-20/30 Plus	Saby-21/31 Plus
Ruedas		
Medidas ruedas delanteras	Ø 20 cm	Ø 20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 30 cm	Ø 60 cm
Ancho ruedas delanteras	5 cm	5 cm
Ancho ruedas traseras	5 cm	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas	Macizas

Otras características

Bolsa trasera	28 x 22 cm
Horquilla	Fabricada en aluminio
Puños	Regulables en altura (3 posiciones)
Centro de gravedad	Regulable (2 posiciones)
Tipo de freno	Freno maneta y freno bloqueo
Tipo de plegado	Cruceta simple con 4 estabilizadores



INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	Saby-20/30 Plus	Saby-21/31 Plus
Ancho total (talla 40)	55 cm	58,5 cm
Ancho total (talla 42)	57,5 cm	61 cm
Ancho total (talla 45)	60,5 cm	65 cm
Alto (regulable en 3 puntos)	90 - 96 cm	90,5 - 96,5 cm
Profundidad total (talla 40)	97,5 cm	103,5 cm
Profundidad total (talla 42)	98,5 cm	103,5 cm
Profundidad total (talla 45)	99 cm	104,5 cm
Ancho total plegada	26 cm	29 cm
Peso		
Peso total (Saby-20 acero)	15,90 kg	
Peso total (Saby-21 acero)	17,40 kg	
Peso total (Saby-30 aluminio)	12,90 kg	
Peso total (Saby-31 aluminio)	14,40 kg	
Peso máximo soportado	120 kg	
Material		
Saby-20/21	Acero	
Saby-30/31	Aluminio	
Color	Azul mate / Gris mate	


SABY PLUS: EXCELENCIA
EN CADA DETALLE

TODAS LAS PRESTACIONES Y EL MEJOR RENDIMIENTO DEL MERCADO

SABY PLUS

6°

ESTUDIO ERGONÓMICO CON
RESPALDO INCLINADO A 6°
PARA OPTIMIZAR LA POSTURA Y
LA DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES

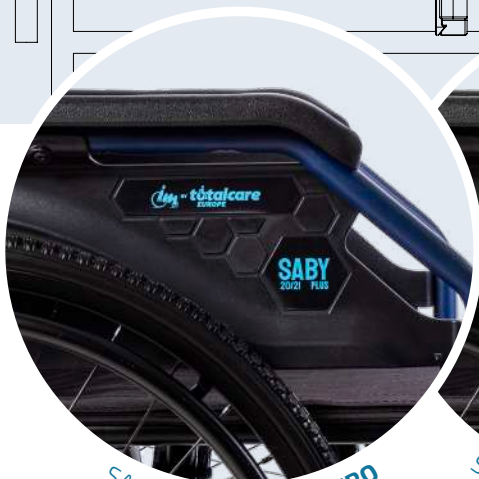

SABY-20/21 PLUS **ACERO**



SABY-30/31 PLUS **ALUMINIO**



HORQUILLA

DE ALUMINIO



RUEDAS DELANTERAS

DE 5 CM DE ANCHO



FUNDAS Y TEJIDOS

ACOLCHADOS



INCLUIDO DE SERIE

KIT DE FRENO



INCLUIDO DE SERIE

QUICK RELEASE



CRUCETA CON

ESTABILIZADORES



MÁXIMA PERSONALIZACIÓN, MÁXIMO CONFORT

AMPLIA VARIEDAD DE OPCIONES
DE AJUSTE Y CONFIGURACIÓN PARA
ADAPTARSE A CADA USUARIO



REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LOS PUÑOS

La altura de los puños se ajusta fácilmente en 3 posiciones, permitiendo adaptar la silla entre 90,5 cm y 96,5 cm.



REGULACIÓN DE ALTURA DEL REPOSABRAZOS

De serie se incluye un accesorio que permite elevar el reposabrazos 2 cm, proporcionando mayor comodidad cuando sea necesario.



REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DEL RESPALDO

La tensión del respaldo puede ajustarse mediante las cinco cinchas situadas en la parte trasera, pudiendo adaptar el posicionamiento del usuario.



REGULACIÓN DEL LARGO DEL ASIENTO

El asiento es regulable en profundidad, pudiendo ampliarse hasta 8 cm (de 42 a 49 cm). Esta extensión se logra desplegando la tira de tejido situada bajo el asiento. El anclaje se realiza mediante velcro, fijándolo en cada reposapiés.



REGULACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD

El centro de gravedad puede modificarse fácilmente mediante la pletina de la rueda trasera de Ø60 cm. Al desplazarla hacia atrás, la silla se vuelve más pasiva y el centro de gravedad queda más adelantado respecto al eje.



REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ASIENTO

La altura del asiento se ajusta modificando la posición del eje de las ruedas. Dispone de tres puntos de regulación, tanto en las ruedas delanteras como traseras, permitiendo una altura de asiento de 45,5 cm a 50,5 cm.



REGULACIÓN DE LA ALTURA E INCLINACIÓN DEL REPOSAPIÉS

Los reposapiés individuales se ajustan en altura en 3 posiciones, con una distancia de la plataforma al suelo de 15,5 cm a 19,5 cm. Además, es posible configurar fácilmente la inclinación de la plataforma.

DESCUBRA LA ÚLTIMA INNOVACIÓN
DE IM BY TOTALCARE EUROPE

SABY PLUS

SILLA DE RUEDAS MANUAL DE ACERO O ALUMINIO, COMPACTA Y SUPERCOMPLETA



KIT DE FRENO INCLUIDO

El modelo Saby Plus incorpora de serie un kit de freno de mano que incluye freno de asistencia y freno de bloqueo.



PUÑOS REGULABLES

La altura de los puños se ajusta en 3 posiciones, permitiendo adaptar la silla entre 90,5 cm y 96,5 cm.



FUNDAS Y TEJIDOS DE ALTA CALIDAD

Tapizados acolchados y mullidos de gran calidad, extraíbles. Incluye cinchas para regular la tensión del respaldo y asiento ampliable en profundidad.



REPOSABRAZOS

Reposabrazos ergonómicos, abatibles y con opción de regulación en altura hasta 2 cm.



RUEDAS TRASERAS EXTRAÍBLES

Tanto las sillas Saby-20/30 Plus, con ruedas traseras de Ø30 cm, como las Saby-21/31 Plus de Ø60 cm, incorporan de serie un sistema quick release que permite una extracción rápida y sencilla.



REGULACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD

La rueda trasera de Ø60 cm permite regularla en profundidad. Al desplazarla hacia atrás, la silla se vuelve más pasiva y el centro de gravedad queda más adelantado respecto al eje.



RUEDAS DELANTERAS Y HORQUILLA DE ALUMINIO

Las ruedas delanteras se caracterizan por su gran tamaño, con un diámetro de Ø200 mm y un ancho de 50 mm, ideales para terrenos irregulares. Además, las horquillas son de aluminio.



REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ASIENTO

La altura del asiento se ajusta modificando la posición del eje de las ruedas, con tres niveles de regulación en los ejes delantero y trasero para una adaptación precisa.

SABY

LA FAMILIA DE SILLAS MANUALES
MÁS COMPLETA DEL MERCADO

SABY 20



SABY 20
CON KIT
DE FRENO



SABY 21



SABY 30



SABY 30
CON KIT
DE FRENO



SABY 31



SABY LITE



SABY 30
PLUS



SABY 31
PLUS

