



Calabria 2

Silla de ruedas
eléctrica basculante

MANUAL DE USUARIO

Ref. SEFACALABRIA2

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva silla de ruedas eléctrica **Calabria 2**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 — Partes de la silla.....	4
2 — Descripción del producto	4
3 — Características del producto	5
4 — Precauciones y guía de seguridad.....	7
5 — Uso y montaje	8
6 — Carga de las baterías.....	10
7 — Mantenimiento y aviso.....	11
8 — Garantía	13

1. PARTES DE LA SILLA



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA CON BASCULACIÓN ELECTRÓNICA

La silla de ruedas Calabria 2 incorpora un asiento que bascula electrónicamente, con un rango entre 90 y 130 grados.

Ofrece un respaldo anatómico muy confortable, con un cabezal que proporciona un mejor y correcto apoyo cervical, con elevación de sus reposapiés.

La Calabria 2 es una silla de ruedas con una autonomía de hasta 30 a 40 km, gracias a sus dos baterías de 75 Ah. Por otra parte, cuenta con una gran potencia gracias a sus dos motores de 420W.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



CALABRIA 2

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas			
Ancho total		69 cm	
Profundidad total		108 cm	
Alto total		103 cm	
Alto del asiento al suelo		52 cm	
Peso			
Peso total		117 kg	
Peso máximo soportado		160 kg	
Material		Aluminio	Color
			Azul/Rojo
Asiento			
Ancho del asiento		45 cm	
Profundidad del asiento		46 cm	
Tipo de asiento		Fijo	
Material del asiento		Acolchado	
Reposabrazos			
Ancho de reposabrazos		8 cm	
Largo del reposabrazos		35 cm	
Material del reposabrazos		Inyectado	
Tipo de reposabrazos		Regulables en altura	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reposapiés

Tipo de reposapiés	Individuales y elevables
Material del reposapiés	Plástico y aluminio

Respaldo

Ancho del respaldo	40 cm
Alto del respaldo	55 cm
Tipo de respaldo	Reclinación manual de 90° a 130°
Material del respaldo	Tela ignífuga

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 23 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 36 cm
Ancho ruedas delanteras	8 cm
Ancho ruedas traseras	8 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables

Motor

Potencia motor	2 x 420 W
Batería	2 x 75 Ah
Número de baterías	2
Velocidad máxima	8 km/h
Autonomía	30 - 40 km
Cargador externo	8 Ah

Otras características

Basculación	Eléctrica
Claxon	Sí
Frenos	Electromagnéticos
Joystick	Programable
Luces intermitentes	Sí
Luces traseras	Sí
Marcha atrás	Sí
Máxima pendiente de escalada	15°
Radio de giro	850 mm
Reposacabezas	Sí (De serie)
Ruedas antivuelco	Sí



Basculación eléctrica



Reposabrazos extensible



Mando control

4. PRECAUCIONES Y GUÍA DE SEGURIDAD

El usuario debe considerar EMC, instale y ponga en servicio la silla de ruedas Calabria 2 de acuerdo con la información de EMC proporcionada en los documentos adjuntos.

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar a los equipos médicos eléctricos.

- Artículo adaptador: DC24V, 5A (6A)
- Voltaje del adaptador: 110V - 250V (ajustable)
- Longitud del cable de salida: 845mm, sin protector.
- Longitud de la línea de entrada: 1700mm, sin protector.

Utilice este adaptador en silla de ruedas Calabria 2 solamente. Para otro artículo de la silla de ruedas, por favor, consulte con su agente o vendedor antes de usar.



PRECAUCIÓN

- El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados, con la excepción de transductores y cables vendidos como piezas de repuesto para componentes internos, puede resultar en un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad de Calabria 2.
- silla de ruedas Calabria 2 no debe utilizarse junto a otro equipo o apilado con él. Se debe observar la silla de ruedas Calabria 2 para verificar el funcionamiento normal en la configuración en la que se utilizará.
- Utilice este adaptador en silla de ruedas Calabria 2 solamente. Para otro artículo de la silla de ruedas, por favor, consulte con su agente o vendedor antes de usar.

4.1. PREPARACIÓN ANTES DEL FUNCIONAMIENTO

- Ajustar la plataforma según el cuerpo del usuario.
- Ajustar la altura del asiento según el cuerpo del usuario.
- Ajustar la altura de los reposabrazos de acuerdo con el cuerpo del usuario.
- Ajustar la altura de los reposabrazos de acuerdo con el cuerpo del usuario.
- Ajustar la posición del controlador de acuerdo con el cuerpo del usuario.

4.2. COMPROBAR

- Comprobar el marco y todas las juntas.
- Comprobar la cantidad eléctrica.
- Comprobar el inflado del neumático y las partes de conducción.

4.3. PARTES DE LA CONDUCCIÓN

- Comprobar si se puede cambiar libremente entre modo manual y eléctrico.
- Empujar en el modo manual.
- Apague la alimentación para comprobar el botón de la velocidad, bocina y joystick.
- Establecer el modo de espera en el modo motor.

4.4. MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO Y USO

Funcionamiento del controlador

- Asegurar que la silla está en el modo eléctrico.
- Encender alimentación.
- Ajuste el control de velocidad de la silla a LENTO y conduzca lentamente primero.
- Presione suavemente el joystick en la dirección que desee viajar aplicando una presión uniforme constante.
- Coloque la silla en modo manual en caso de emergencia o baja potencia.

4.5. GUÍA DE SEGURIDAD

Este producto es un equipo médico específico para el paciente. Lea el manual cuidadosamente y familiarícese con el funcionamiento antes de usarlo. Las siguientes reglas son para la seguridad del usuario, obedézcalas, de lo contrario, la empresa no tendrá ninguna responsabilidad legal por el uso inapropiado.

Este producto viene con un cargador de batería para la fuente de alimentación comercial, que no puede utilizarse para otros fines.

- No aplique excesiva presión o impacto.
- No puede ser utilizado solo por una persona inconsciente.
- Verifique si puede funcionar con normalidad cuando se usa después de un largo almacenamiento.

- Asegúrese de inflar el neumático antes de usarlo.
- Prohibir la operación de aceleración fuerte o frenada repentina, etc.
- No conduzca en el carril de tráfico.
- No conduzca en túneles, pasajes, elevadores ni cargue el elevador de carga sin ningún protector.
- No desmonte ni cambie el diseño de la silla de forma privada.
- Desconecte la alimentación bajo la condición de operación de error o el frenado automático no funciona.
- Este producto no puede frenar en modo manual.
- El modo manual es solo para que el protector empuje la silla.
- No ajuste la silla en modo manual en la pendiente y en el lugar de la barandilla.

5. USO Y MONTAJE

5.1. USO DE LA ALTURA DE LOS REPOSABRAZOS


Para subir los reposabrazos, desenrosque el pomo que se muestra en la imagen, cuanto más vuelta le des, más podrás elevar el reposabrazos.



5.2. USO DEL BOTÓN DE REINICIO

Esta unidad es para la seguridad de la silla y se apagará inmediatamente si el motor está sobrecargado.

- La silla se detendrá 1 o 2 minutos para enfriarse.
- Presione el botón de reinicio, la silla volverá a la normalidad.

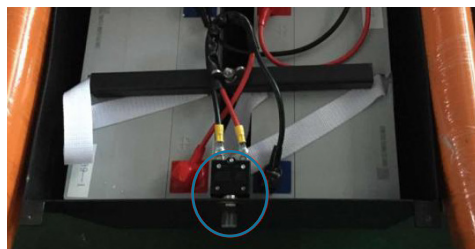

5.3. USO DE LA RECLINACIÓN MANUAL

La reclinación del respaldo funciona a través de una palanca que se sitúa debajo del chasis de la silla, con dicha palanca podrá abatir el asiento o fijarlo para mantener dicha reclinación.



5.4. USO DE LA POSICIÓN DEL CONTROLADOR

- Liberar la tuerca del pomo.
- Gire el reposabrazos apretando el sistema gatillo.
- Ajustar la posición.
- Volver a montar el pomo.



5.5. USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Para evitar accidentes de conducción, asegúrese de abrocharse el cinturón de seguridad.

- **Abrochar:** tiene un clic
- **Desabrochar:** pulsa en botón rojo



5.5. USO DE LA ALTURA DEL REPOSAPIÉS

Retire los tornillos y tuercas de seguridad de cada lado. Deslice el tubo de extensión y el reposapiés arriba o abajo a la altura deseada.



ATTENTION

- La batería no puede ser impactada.
- Use solo las baterías recomendadas y cambie las baterías solo por Distribuidores cualificados.
- Cargue y descargue las baterías cada mes cuando no se utilicen por períodos prolongados.
- Reciclar o manipular las baterías por parte de las autoridades ambientales pertinentes.

5.6. USO DE LA RUEDA LIBRE

- Tirar hacia abajo el interruptor para que se suelte.
- Empujar hacia arriba el interruptor para que se cierre.

Cambie el modo manual al modo motor en caso de pendiente o deslizamiento de emergencia.



5.8. DESMONTAJE Y MONTAJE DEL REPOSAPIÉS

Desmontaje:

- Mover hacia adelante las plataformas del reposapiés.
- Gire el reposapiés, apretando el sistema gatillo.
- Retirar el reposapiés.
- Retire el reposapiés hacia arriba.



Montaje:

- Coloque los reposapiés colocándolos hacia abajo.
- Gire el reposapiés apretando el sistema de gatillo.

6. CARGA DE LAS BATERÍAS

6.1. CARGA DEL MANDO CONTROL

- Apague la alimentación del controlador de la silla antes de cargar.
- Conecte el enchufe DC al controlador y el cargador de batería a un enchufe de pared.
- Cambiar el cargador a la posición de encendido.
- La luz amarilla significa que comienza a cargar, y se vuelve verde cuando la carga está completa.
- Después de cargar, apague la alimentación y desconecte el cable.
- Mantenga la batería en un lugar bien ventilado y seco.


El error de conexión deL DC llevará a la falla del cargador. El cargador puede ser auto-refrigerante, y habrá un poco de ruido.

6.2. CARGADOR EXTERNO

- **Amarillo:** en carga.
- **Verde:** carga completa.


Nº Información

1. Ventilador.
2. Fusible.
3. Indicador de potencia.
4. Indicador de carga.

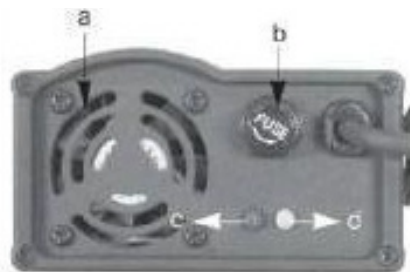

6.3. ESTADO DE CARGA CONFIRMADO

- **Riesgo de descarga:** cuando las tres luces rojas aparecen, significa que se debe cargar batería de modo urgente. **①**
- **Necesidad de carga:** las tres luces rojas y la luz amarilla. **②**
- **Final de carga:** todas las luces verdes. **③**

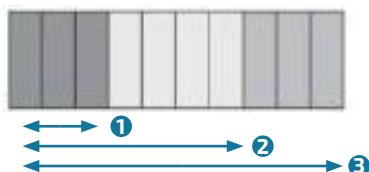

! ATTENTION

- La vida útil de la batería se dañará si no se carga o descarga completamente.
- Por favor apague la alimentación cuando no esté en uso.
- Cargue por completo cada 2 o 3 semanas cuando no esté en uso durante mucho tiempo.
- El rendimiento de la batería se verá afectado por la temperatura, especialmente en el invierno.

7.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

 La silla de ruedas no está certificada por el crash test, por lo que no puede ser utilizada para el transporte en vehículos adaptados.

7.1. MANTENER LOS MÉTODOS DESPUÉS DEL USO

- Desconecte la alimentación, ajústelo en modo estacionamiento.
- Prohibido que niños o personas inconscientes toquen la silla de ruedas.
- Temperatura normal, para evitar la distorsión y mantener la capacidad básica para mucho tiempo.



7.2. GESTIÓN

- Revise el neumático periódicamente.
- Empuje hacia abajo antes de quitar los enchufes.
- No fuerza exterior.
- Reparación por personas profesionales.

7.3. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN

- Limpie con un paño limpio y suave y úselo después de secarlo. No use productos químicos para Limpiar (evita el cambio de color y distorsión).
- Limpiar cuando se ensucie y usar después de secar.



Producto	Cualquier momento	Cada semana	Cada mes	Cada medio año
Cada parte			●	
Girar, conducir, montar y desmontar		●		
Freno (marque cuando estado eléctrico)	●			
Estado de conexión del cable		●		
Estado de carga de la batería	●			
Inflado del neumático delantero		●		

Producto	Cualquier momento	Cada semana	Cada mes	Cada medio año
Inflado del neumático trasero		●		
Erosión del neumático			●	
Daño del neumático	●			
Erosión del asiento. Tapicería respaldo	●			
Motor				●
Equipamento		●		
Limpiar	●			

8. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto está defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA

La Calabria 2 es una silla de ruedas con una autonomía de hasta 30 a 40 km, gracias a sus dos baterías de 75 Ah. Por otra parte, cuenta con una gran potencia gracias a sus dos motores de 420W..



RESPALDO BASCULANTE

La silla de ruedas Calabria 2 incorpora un asiento que bascula electrónicamente, con un rango entre 90 y 130 grados.



Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Silla de ruedas eléctrica basculante Calabria 2

V5 · 12/12/2025