



PC-15/151

Silla de ruedas
manual de acero

MANUAL DE USUARIO

Ref. SACPC15

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva silla de ruedas **PC-15**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 — Partes de la silla.....	4
2 — Descripción del producto	4
3 — Características del producto	5
4 — Uso	7
5 — Mantenimiento.....	9
6 — Aviso	9
7 — Garantía.....	10

1. PARTES DE LA SILLA



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PC-15/151 SILLA DE RUEDAS DE ACERO PLEGABLE

La silla de ruedas de acero PC-15/151 se caracteriza por su respaldo reclinable 180° y la posibilidad de regular sus reposapiés en altura o abatirlos, ofreciendo un máximo confort, descanso y una correcta postura. Es ideal para ser utilizada

en exteriores, proporcionando una mayor estabilidad a su usuario, que podrá auto propulsarse y superar bordillos sin problemas.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



PC-15



PC-151

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	PC-15	PC-151
Ancho total (Talla 40)	56 cm	66 cm
Ancho total (Talla 42)	58 cm	68 cm
Ancho total (Talla 45)	61 cm	71 cm
Profundidad total (mín-máx)	120,5 - 125 cm	122,5 - 126 cm
Profundidad sin los reposapiés	82 cm	86 cm
Alto total	125 cm	125 cm
Ancho total plegada	15 cm	15 cm
Alto del asiento al suelo	49 cm	49 cm

Peso	PC-15	PC-151
Peso total	22,50 kg	24,70 kg
Peso sin los reposapiés	19,20 kg	21,40 kg
Peso máximo soportado	120 kg	120 kg

Material	Acero	Color	Azul mate
----------	-------	-------	-----------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento (talla)	38/42/45 cm
Profundidad del asiento	40 cm
Tipo de asiento	Fijo
Material del asiento	Tela ignífuga

Reposabrazos

Ancho del reposabrazos	5 cm
Largo del reposabrazos	26 cm
Tipo de reposabrazos	Fijos

Reposapiés

Profundidad reposapiés (mín-max)	36,5 - 40 cm
Peso de los 2 reposapiés	3,3 kg
Tipo de reposapiés	Elevables y extraíbles

Respaldo

Ancho del respaldo (Talla 38)	38 cm
Ancho del respaldo (Talla 42)	42 cm
Ancho del respaldo (Talla 45)	45 cm
Alto del respaldo con reposacabezas	125 cm
Alto del respaldo sin reposacabezas	100 cm
Tipo de respaldo	Abatible 180°
Material del respaldo	Tela ignífuga


Ruedas	PC-15	PC-151
Medidas ruedas delanteras	Ø 20 cm	Ø 20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 31,5 cm	Ø 60 cm
Color ruedas delanteras	Negra	Negra
Color ruedas traseras	Negra	Negra
Tipo de ruedas	Macizas/ Hinchables	Macizas/ Hinchables

Otras características

Tipo de freno	Freno bloqueo
Tipo de plegado	Cruceta simple con 4 estabilizadores
Reposacabezas	Sí, extraíbles



Reposapiés elevables

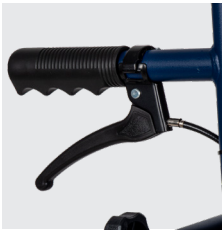

Reclinar respaldo




Silla plegable

4. USO Y MONTAJE

4.1. USO DEL DESPLEGADO

Posicione la silla a su lado. Para desplegar su silla de ruedas, deberá de colocar sus manos en ambos laterales de los tubos que se posicionan debajo de la tela del asiento, ejerza presión hacia abajo para desplegar la silla. Una vez desplegada, ponga el tubo que se encuentra detrás del respaldo

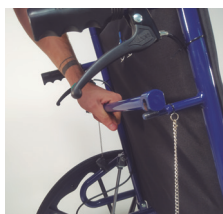

4.2. USO DEL PLEGADO

Primero extraiga el tubo de acero que se encuentra detrás del respaldo. Para plegar su silla, los reposapiés deben de estar abatidos. Deberá de coger desde el centro del asiento por ambos extremos y ejercer un movimiento hacia arriba, si se pasa de fuerza, puede levantar la silla.



4.3. USO DE RECLINAR EL RESPALDO

Detrás del respaldo, debajo de los puños, encontrará el reclinado del respaldo, haga presión en las manos para reclinar o no el respaldo.



4.4. USO DE ABATIR EL REPOSAPIÉS

Tire la palanca de acero hacia delante para poder abatir los reposapiés, cuando tenga ya la altura que desea, suelte la palanca para que se fije. Para bajar los reposapiés, tire de la palanca y volverá a su posición más baja.



4.5. USO DE LOS FRENOS

El usuario sujeta los frenos con las manos, una vez la silla está quieta, los acciona, para que las ruedas traseras queden completamente bloqueadas.



4.6. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL RESPALDO

Extraiga sencillamente la parte de arriba del respaldo. Para colocarlo, mire que cuadre bien los agujeros del respaldo en la parte superior.



4.7. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS REPOSABRAZOS

Estire del pequeño objeto de acero para extraer el reposabrazos completamente. Para colocarlo, vuelva a estirar, sabrá que su reposabrazos se ha colocado correctamente cuando escuche un "clic"



4.8. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS REPOSAPIÉS

Para extraer los reposapiés, deberá de mover el sistema de gatillo y a la vez levantar el reposapiés. Para colocarlo, mire que encaje bien y desplácelo, deberá de escuchar un "clic"



5. MANTENIMIENTO

- Examinar la silla periódicamente para comprobar que estén todos los tornillos y que estén ajustados antes de utilizar la silla. En caso que falte alguno o que alguno esté flojo llevarla al servicio técnico.
- Se debe añadir aceite lubricante en las partes móviles de la silla para un mejor funcionamiento.
- Limpiar la silla con un paño suave y seco.
- Mantener el tapizado de asiento y respaldo limpios para proteger la piel del usuario.

6. AVISO

⚠ La silla de ruedas no está certificada por el crash test, por lo que no puede ser utilizada para el transporte en vehículos adaptados.

- Se aconseja utilizar la silla en superficies planas, dentro o fuera de una habitación, en recorridos más largos es preferible que siempre haya un acompañante para poder ayudar al usuario, en caso de encontrarse con obstáculos.
- La silla tiene una capacidad máxima de 120kg.
- Para utilizar la silla de ruedas sin problemas, la velocidad debe ser de 3 a 5km/h.
- Los frenos se utilizan para subir o bajar, para parar la silla. No utilizar los frenos si está en movimiento, especialmente si se sube o baja una pendiente, hay riesgo de volcar.
- Los usuarios no deben incorporarse sobre los reposapiés podrían volcar la silla y caer.
- Mientras usa la silla de ruedas en una pendiente no incline la silla ni giré repentinamente.

7. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

PC-151

La silla de ruedas de acero PC-15/151 se caracteriza por su respaldo reclinable 180° y la posibilidad de regular sus reposapiés en altura o abatirlos, ofreciendo un máximo confort, descanso y una correcta postura.



PC-151

Es ideal para ser utilizada en exteriores, proporcionando una mayor estabilidad a su usuario, que podrá auto propulsarse y superar bordillos sin problemas.



Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Silla de ruedas manual de acero, PC-15/151

V4 · 16/04/2024